

Navodila za uporabo

Opis izdelka:

Alkoholni robček za razkuževanje površin


topdental™

Bossklein®

Datum revizije: 23/06/22 v1.5

Za površinsko dezinfekcijo neinvazivnih medicinskih pripomočkov. Posebej oblikovan za uporabo v medicinskem in zobozdravstvenem okolju.


Dozirniki

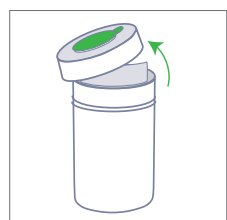


1. Odstranite pokrov dozirnika.




2. Preko vrha vrečke odrežite rob neprepustne plastične vrečke.

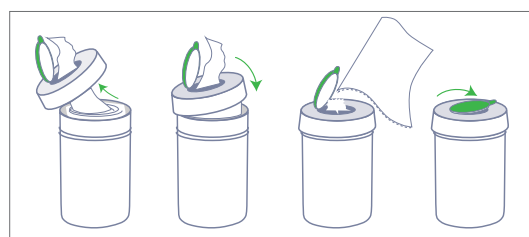

3. Povlecite sredinski robček skozi luknjo v pokrovčku in ga zamenjajte. Povlecite robček pod kotom 45°.

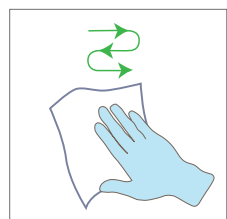


4. Z zadostno količino robčkov za vsako aplikacijo obrišite čiste površine, ki jih želite razkužiti, tako da so popolnoma navlažene.

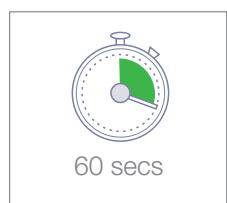


5. Pustite, da razkužilo deluje 60 sekund. Pustite, da površinska vlaga izhlapi. Samo za profesionalno uporabo. Za nadaljnje informacije glejte oznake izdelkov in varnostni list.


Polnilo

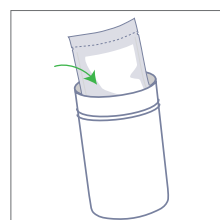


1. Postavite vrečko v polnilo.

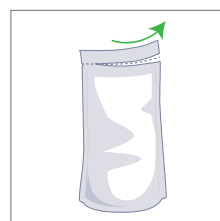


2. Izrežite odprto neprepustno plastično vrečko čez vrh vrečke.

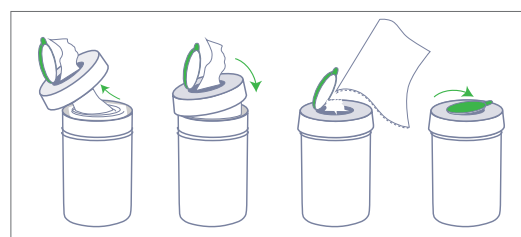

3. Postavite sredinski robček skozi luknjo v pokrovčku in ga zamenjajte. Povlecite robček pod kotom 45°.

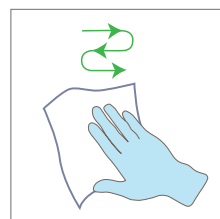

4. Z zadostno količino robčkov za vsako aplikacijo obrišite čiste površine, ki jih želite razkužiti, tako da so popolnoma navlažene.

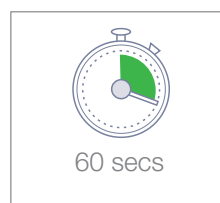

5. Pustite, da razkužilo deluje 60 sekund. Pustite, da površinska vlaga izhlapi. Samo za profesionalno uporabo. Za nadaljnje informacije glejte oznake izdelkov in varnostni list.

Učinkovitost (60 sekund): baktericidno, vključno z MRSA, VRE. Učinkuje na kvasovke. Mikobaktericidno. Tuberkulocidno. Virusi vključujejo: viruse brez ovojnice: mišji norovirus, adenovirus 5. viruse z ovojnicjo: virus hepatitisa B (HBV), virus hepatitisa C (HCV), virus hepatitisa Delta, virus humane imunskve pomanjkljivosti (HIV), virus gripe, koronavirus, herpesviridae, Filoviridae (ebola), rdečke, steklina, ošpice, Poxviridae.

Preizkušeno po standardih: EN 16615, EN 14885, EN 14476, EN 14348, EN 13727, EN 13624.

Sestava: etanol (64-17-5) 63 % m/m (630 g/kg), voda, parfumi.

Nevarnost. H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzroča hudo draženje oči. P303+P361+P353: PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj slecite vsa kontaminirana oblačila. Kožo sperite z vodo. P305+P351+P338: PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in jih je enostavno narediti. Nadaljujte z izpiranjem. P370+P378: V primeru požara: Za gašenje uporabite alkoholno odporno peno ali ogljikov dioksid. **Shranjevanje.** P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Prepovedano kajenje. P403+P233: Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Posodo hraniti tesno zaprto. P235: Hraniti na hladnem. **Kontraindikacije.** Nezdružljivi materiali: baker, aluminij. Ne uporabljajte na površinah, občutljivih na alkohol. Alkohol ni priporočljiv za uporabo na zobnih/medicinskih instrumentih. **Odstranjevanje.** Ne izpuščajte tekočine v odtoke ali reke. Ne izpirajte. Ni macerabilno.

Predvidena uporaba: Površine izdelkov v zobozdravstveni ordinaciji, ki jih uporablja zobozdravnik ali zobozdravstveni asistent kot del svoje splošne rutine razkuževanja med obiski pacientov. Pacienti običajno med uporabo niso prisotni, vendar vsi pacienti, ki jih vidimo v ordinaciji, prispevajo k potrebi po izdelkih. Vsak resen incident, povezan s tem medicinskim pripomočkom, je treba prijaviti proizvajalcu in pristojnim organom.

Aroma limone UFI:EE00-VOC9-F00M-WVDU Naravna aroma UFI:NH00-D01P-S004-K6YW



DIRECTA AB
P.O. Box 723, Fimvids väg 8 SE-194 27
Uplands Väsby, Sweden



Za dodatne jezike
poglejte www.topdental.co.uk



Nevarnost